


## EZ Guidewire

### 1 모양 및 구조

#### 가. EZ Guidewire 설명

- 1) EZ Guidewire는 Nitinol Core wire를 이용하여 미세혈관을 따라 병변 부위의 중재적 시술에 사용되는 마이크로카테터 속으로 들어가 사용되도록 설계되었다.
- 2) 방사선 투시 하에서 중재적 시술에 도움이 되도록 하기 위하여 방사선 표식자가 와이어의 팁 부분에 부착되어 있다.

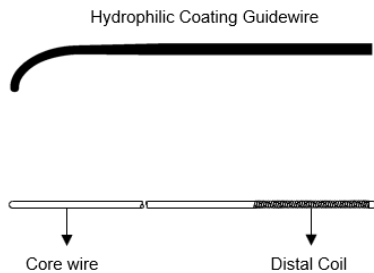

### 2 사용목적

EZ Guidewire는 경피카테터를 혈관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 기구

### 3 사용방법

#### 가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 외관상태나 포장에 이상이 없는지 확인한다.
- 2) 제품을 사용하기 전에는 충분히 생리식염수로 적셔 놓는다. 멸균포장 상태와 사용기한을 확인한다.
- 3) 몸에 삽입 시에는 와이어 손잡이를 이용하여 와이어의 끝에 연결하여 사용한다.

#### 나. 사용방법

- 1) 보호코일에서 와이어를 제거하기 전에 주사기를 이용하여 생리 식염수 용액에 와이어를 2분 정도 적셔 놓는다.
- 2) 보호코일에서 와이어를 제거할 때 주의한다.
- 3) 꼬임 또는 손상이 없는지 확인한다.
- 4) 와이어를 카테터에 삽입하기 위해서는 식염수로 카테터를 적시면서 천천히 삽입한다.
- 5) 와이어를 카테터와 sheath에 끼워 넣었을 때 적어도 5cm를 Proximal hub에 뺀다.
- 6) 특별한 혈관에 카테터를 삽입시키는 것을 돕기 위해서 부드럽게 와이어의 proximal end를 앞으로 전진시킨다.

#### 다. 사용 후 보관 및 관리방법

1회용 멸균 의료기기 제품이므로 사용 후 지정된 폐기 장소에 보관하여 폐기 처분하며 재사용을 금지한다.

### 4 사용 시 주의사항

- 1) 본 제품을 관상혈관에 사용해서는 안된다.
- 2) 보호막 제거 후 와이어의 모든 부위가 손이나 기타 부위와 접촉되지 않도록 주의한다.
- 3) 1회에 한하여 사용해야 한다. 사용한 제품에 대해서는 재멸균하여 사용해서는 안 된다.
- 4) 카테터의 사용 중 다음과 같은 잠재적 합병증에 주의한다.
  - 혈관 또는 동맥벽의 구멍

- 혈전 형성
- 구멍 또는 상처지역의 혈종
- 혈관경련
- 감염
- 국소빈혈

### 5 저장방법

직사광선이 들지 않는 상온의 건조한 장소에 보관

### 6 사용기한: 제조일로부터 2년

### 7 라벨 Symbol



제조사(Manufacturer)



제조일자(Date of manufacture)



사용기한(Use-by date)



Ethylene Oxide를 이용한 멸균제품(Sterilized using Ethylene Oxide)



카탈로그 번호(Catalogue number)



제품 제조번호(Batch number)



포장 파손 시 사용금지(Do not use if package is damaged)



직사광선 노출 금지(Keep away from sunlight)



습기 엄금(Keep dry)



온도제한(Temperature limit)



재사용 금지(Do not re-use)



사용자설명서 참조(Consult instructions for use)



주의(Caution)

#### [제조사] Access Point Medical ASIA Corporation

Bldg. 36, Philexcel Business Park, MA Roxas Highway, Clark Freeport Zone, 2023 Philippines

#### [제조외지사] 주식회사 바스노바

(17023)경기도 용인시 처인구 포곡읍 부곡로 82  
Tel. 031-748-6625  
Fax. 031-748-6620  
E-mail. vasnova@vasnova.co.kr

#### [허가번호] 제인04-451호(EZ Guidewire)

Doc. No.: MKO-21-01(rev.5)

Date: 2026.03.06