



Pliant Guidewire

1 모양 및 구조

가. Pliant Guidewire 설명

- 1) Pliant Guidewire는 진단 혹은 중재적 시술 동안 카테터의 설치 및 교체를 지원하고자 개발 및 설계되었다. 본 제품은 카테터 등을 혈관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 기구로, Nitinol Core Wire에 PU Jacket을 씌운 후 친수성 코팅을 한 혈관카테터 안내선이다. 안내선의 원위부는 일자형태(Straight)와 J 형태(J Shape)를 제공한다.

타입	그림
일자형태(Straight)	
J 형태(J Shape)	

2 사용목적

카테터를 혈관 속으로 유도하기 위하여 카테터 속에 넣어 사용하는 코일 형태의 기구

3 사용방법

가. 사용 전 준비사항

- 1) 제품의 외관 상태나 포장에 이상이 없는지 확인한다.
- 2) 제품을 사용하기 전에는 충분히 생리식염수로 적셔 놓는다.
- 3) 멸균포장 상태와 사용기한을 확인한다.

나. 사용방법

- 1) 보호코일에서 와이어를 제거하기 전에 주사기를 이용하여 생리식염수 용액에 와이어를 2분 정도 적셔 놓는다.
- 2) 보호코일에서 와이어를 제거할 때 주의한다.
- 3) 꼬임 또는 손상이 없는지 확인한다.
- 4) 와이어를 카테터에 삽입하기 위해서는 식염수로 카테터를 적시면서 천천히 삽입한다.
- 5) 원하는 위치에 들어갔을 때 시술에 사용되는 기구를 이동시킨다.

다. 사용 후 보관 및 관리방법

1회용 멸균 의료기기 제품이므로 사용 후 지정된 폐기 장소에 보관하여 폐기 처분하며 재사용, 재멸균을 금지한다.

4 사용 시 주의사항

- 1) 본 제품을 관상혈관에 사용해서는 안 된다.
- 1) 보호막 제거 후 와이어의 모든 부위가 손이나 기타 부위와 접촉되지 않도록 주의한다.
- 2) 1회에 한하여 사용해야 한다. 사용한 제품에 대해서 재멸균하여 사용해서는 안 된다.
- 3) 카테터의 사용 중 다음과 같은 잠재적 합병증에 주의한다.
 - 혈관 또는 동맥벽의 구멍
 - 혈전 형성
 - 구멍 또는 상처지역의 혈중
 - 혈관경련
 - 감염
 - 국소빈혈

5 저장방법

직사광선이 들지 않는 상온의 건조한 장소에 보관

6 사용기한: 제조일로부터 3년

7 라벨 Symbol



제조사(Manufacturer)



제조일자(Date of manufacture)



사용기한(Use-by date)



Ethylene Oxide를 이용한 멸균제품(Sterilized using Ethylene Oxide)



카탈로그 번호(Catalogue number)



제품 제조번호(Batch number)



포장 파손 시 사용금지(Do not use if package is damaged)



직사광선 노출 금지(Keep away from sunlight)



습기 엄금(Keep dry)



온도제한(Temperature limit)



재사용 금지(Do not re-use)



사용자설명서 참조(Consult instructions for use)



주의(Caution)

[제조사] Access Point Medical ASIA Corporation

Bldg. 36, Philexcel Business Park, MA Roxas Highway, Clark Freeport Zone, 2023 Philippines

[제조외리자] 주식회사 바스노바

(17023)경기도 용인시 처인구 포곡읍 부곡로 82
Tel. 031-748-6625
Fax. 031-748-6620
E-mail. vasnova@vasnova.co.kr

[허가번호] 제인13-238호(Pliant Guide wire)

Doc. No.: MKO-21-02(rev.7)

Date: 2026.03.06